

# クリーニングデバイスの使用方法について




## クリーニング デバイス

ISO80369-3  
オスコネクタに  
付着した汚れを  
取り除くツールです。

1

手を消毒するか、手袋を着用してチューブのオスコネクタ部分のキャップを外します。

2

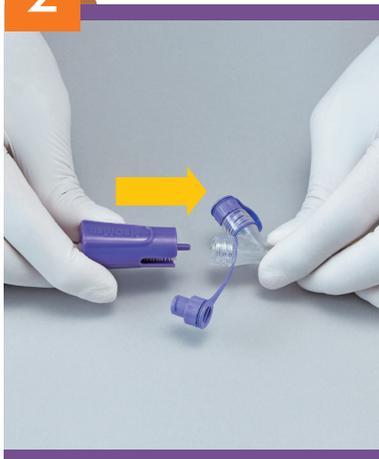

クリーニングデバイスのプラグ(凸部分)をチューブのオスコネクタ部分に挿入します。この時プラグを挿入し過ぎないようにしてください。ブラシが抜けにくくなる可能性があります。

3



クリーニングデバイスをオスコネクタにスライドさせ、内部のブラシとオスコネクタをかみ合わせます。

4



クリーニングデバイスを少なくとも360度回転させて、汚れを取り除きます。

5



クリーニングデバイスを慎重に取り外し、施設の手順に従って廃棄します。

**ご使用上の注意** 本品は単回使用製品です。ご使用中はプラグがコネクタとかみ合っていることをご確認ください。